

CÂNULA DE SHAVER PARA ESTENOSE HT

MANUAL DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO

A Cãnula de Shaver para Estenose HT é composta por uma cãnula guia (externa), uma cãnula de corte e sucção (interna) e o encaixe traseiro. A Cãnula de Shaver para Estenose HT foi desenvolvida para ser conectada juntamente ao aparelho de Shaver.

A Cãnula de Shaver Estenose HT é indicada para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseos e cartilaginosos onde haja um estreitamento anormal no centro do canal vertebral ou em suas regiões adjacentes, denominado Estenose de canal vertebral.

MODELOS

7400.001 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE AR
7400.002 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE AR
7400.003 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE AR
7400.004 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE EP
7400.005 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE EP
7400.006 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE EP
7400.007 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE LV
7400.008 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE LV
7400.009 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE LV
7400.010 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE RZ
7400.011 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE RZ
7400.012 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE RZ
7400.013 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE ST
7400.014 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE ST
7400.015 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE ST
7400.016 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE AR
7400.017 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE AR
7400.018 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE AR
7400.019 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE EP
7400.020 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE EP
7400.021 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE EP
7400.022 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE LV
7400.023 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE LV
7400.024 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE LV

7400.025 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE RZ
7400.026 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE RZ
7400.027 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE RZ
7400.028 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE ST
7400.029 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE ST
7400.030 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE ST
7400.031 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE AR
7400.032 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE AR
7400.033 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE AR
7400.034 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE EP
7400.035 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE EP
7400.036 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE EP
7400.037 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE LV
7400.038 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE LV
7400.039 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE LV
7400.040 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE RZ
7400.041 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE RZ
7400.042 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE RZ
7400.043 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE ST
7400.044 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE ST
7400.045 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE ST
7400.046 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE AR
7400.047 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE AR
7400.048 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE AR
7400.049 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE EP
7400.050 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE EP
7400.051 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE EP
7400.052 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE LV
7400.053 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE LV
7400.054 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE LV
7400.055 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE RZ
7400.056 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE RZ

7400.057 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE RZ
7400.058 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE ST
7400.059 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE ST
7400.060 - CÂNULA BRH Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE ST
7400.061 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE AR
7400.062 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE AR
7400.063 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE AR
7400.064 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE EP
7400.065 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE EP
7400.066 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE EP
7400.067 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE LV
7400.068 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE LV
7400.069 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE LV
7400.070 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE RZ
7400.071 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE RZ
7400.072 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE RZ
7400.073 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE ST
7400.074 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE ST
7400.075 - CÂNULA BRH Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE ST
7400.076 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE AR
7400.077 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE AR
7400.078 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE AR
7400.079 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE EP
7400.080 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE EP
7400.081 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE EP
7400.082 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE LV
7400.083 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE LV
7400.084 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE LV
7400.085 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE RZ
7400.086 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE RZ
7400.087 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE RZ
7400.088 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE ST

7400.089 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE ST
7400.090 - CÂNULA BRH Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE ST
7400.091 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE AR
7400.092 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE AR
7400.093 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE AR
7400.094 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE EP
7400.095 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE EP
7400.096 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE EP
7400.097 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE LV
7400.098 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE LV
7400.099 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE LV
7400.100 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE RZ
7400.101 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE RZ
7400.102 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE RZ
7400.103 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM CP ENCAIXE ST
7400.104 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM CP ENCAIXE ST
7400.105 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM CP ENCAIXE ST
7400.106 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE AR
7400.107 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE AR
7400.108 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE AR
7400.109 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE EP
7400.110 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE EP
7400.111 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE EP
7400.112 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE LV
7400.113 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE LV
7400.114 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE LV
7400.115 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE RZ
7400.116 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE RZ
7400.117 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE RZ
7400.118 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM CP ENCAIXE ST
7400.119 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM CP ENCAIXE ST
7400.120 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM CP ENCAIXE ST

7400.121 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE AR
7400.122 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE AR
7400.123 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE AR
7400.124 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE EP
7400.125 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE EP
7400.126 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE EP
7400.127 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE LV
7400.128 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE LV
7400.129 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE LV
7400.130 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE RZ
7400.131 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE RZ
7400.132 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE RZ
7400.133 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM CP ENCAIXE ST
7400.134 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM CP ENCAIXE ST
7400.135 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM CP ENCAIXE ST
7400.136 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE AR
7400.137 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE AR
7400.138 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE AR
7400.139 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE EP
7400.140 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE EP
7400.141 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE EP
7400.142 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE LV
7400.143 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE LV
7400.144 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE LV
7400.145 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE RZ
7400.146 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE RZ
7400.147 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE RZ
7400.148 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 190MM SP ENCAIXE ST
7400.149 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 260MM SP ENCAIXE ST
7400.150 - CÂNULA BRD Ø4,5 X 300MM SP ENCAIXE ST
7400.151 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE AR
7400.152 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE AR

7400.153 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE AR
7400.154 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE EP
7400.155 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE EP
7400.156 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE EP
7400.157 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE LV
7400.158 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE LV
7400.159 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE LV
7400.160 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE RZ
7400.161 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE RZ
7400.162 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE RZ
7400.163 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 190MM SP ENCAIXE ST
7400.164 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 260MM SP ENCAIXE ST
7400.165 - CÂNULA BRD Ø5,5 X 300MM SP ENCAIXE ST
7400.166 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE AR
7400.167 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE AR
7400.168 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE AR
7400.169 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE EP
7400.170 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE EP
7400.171 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE EP
7400.172 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE LV
7400.173 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE LV
7400.174 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE LV
7400.175 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE RZ
7400.176 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE RZ
7400.177 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE RZ
7400.178 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 190MM SP ENCAIXE ST
7400.179 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 260MM SP ENCAIXE ST
7400.180 - CÂNULA BRD Ø6,5 X 300MM SP ENCAIXE ST

IMAGEM



MODO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Verifique a integridade da embalagem;
- Verifique a indicação de esterilização e o prazo de validade;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cândia de Shaver para Estenose HT à peça de mão, que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cândia de Shaver para Estenose HT inutilize-a e descarte-a em lixo hospitalar;
- O fabricante recomenda o uso único.

PRECAUÇÕES AO USAR

- O produto somente deve ser manipulado por pessoa habilitada (médico);
- Verificar a integridade da embalagem antes do uso, observando eventuais danos.

CUIDADOS ESPECIAIS NO MANUSEIO

A embalagem interna só deve ser violada momentos antes do procedimento;

Verifique a integridade dos itens que compõem o produto, caso esteja rasgado, descarte-o.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.
- Condições ambientais: Temperatura: 10 °C a 40 °C.

Umidade Relativa: 30% a 75% sem condensação;

Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

ESTERILIZAÇÃO

A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, caso a embalagem esteja violada essa garantia é automaticamente cancelada.

O produto é esterilizado por **ETO** válido por 2 (dois) anos.

RASTREABILIDADE

A Cânula de Shaver para Estenose HT possui número de série e lote que possibilita seu rastreamento e o seu destino caso seja necessário. Este número está disponível nos rótulos de embalagem e nas etiquetas de prontuário.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto é fornecido estéril. Não utilize o produto se a embalagem estiver violada ou fora das condições corretas de armazenamento e transporte;
- A esterilização possui validade dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada;
- Este produto deve ser utilizado por profissionais da área de saúde, que estejam familiarizados, devidamente treinados e habilitados para utilização dos instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis;
- O descarte do equipamento ou de peças deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada para resíduo patogênico.



O fabricante recomenda o uso único.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado;

- Verificar sempre as conexões;
- O fabricante recomenda o uso único.

CONTRAINDICAÇÕES OU EFEITOS ADVERSOS

Não foram encontradas contraindicações ou efeitos adversos durante a utilização deste produto.

DESCARTE

O descarte deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada para resíduo patogênico.

SIMBOLOGIA UTILIZADA

REF Código de referência

LOT Identificação de lote

STERILE Produto esterilizado por **ETO**



Proteja contra exposição solar e umidade



Proteja contra radiação



Limite de Temperatura ambiente



Atenção consulte o manual do usuário.

FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Hortron Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda

Avenida Getúlio Vargas 2831 - Recreio São Judas Tadeu

CEP: 13571-271 - São Carlos - SP

CNPJ: 13.459.890/0001-46

AFE: 8.12885.4

Responsável Técnico: Jonas José Villanova - CREA/SP: 5060538637

CADASTRO ANVISA Nº: 81288549021

Rev00 – 04/03/2024